

ПРОТОКОЛЫ ВВЕДЕНИЯ MIRALINE PLLA 28



MiraLine

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1

Снижение эластичности и атрофические изменения кожи

2

Коррекция морщин

3

Липодистрофия

4

Атрофические рубцовые изменения (постакне, стрии)



СОДЕРЖАНИЕ

- 4 Состав и характеристика
- 5 Структура частиц
- 6 Эффективность и безопасность
- 7 Гистологическое исследование

- 8 **Коррекция лица**
- 20 **Коррекция экстрафациальных зон**
- 28 **Сочетание с другими методами за один сеанс**

Протокол введения MiraLine PLLA 28 у пациента с мелкоморщинистым морфотипом

Основные характеристики

- Индивидуальная формула тканей:
 - тонкие поверхностные ткани,
 - подкожно-жировой слой скудный,
 - подвижность тканей умеренная,
 - дефициты глубоких жировых пакетов и скелетной опоры.
- Ведущие клинические симптомы:
 - потеря тонуса кожи,
 - множественные распространенные морщины,
 - выраженные признаки фотостарения,
 - потеря объемов от умеренной до выраженной.

Основные задачи коррекции поверхностных мягких тканей

- Повышение тонуса кожи, уменьшение количества и глубины морщин.
- Восполнение дефицита объемов.
- Лифтинг мягких тканей.

Таргетные зоны инъекций и примерное распределение препарата

- Равномерное распределение препарата по всем зонам:
 - височная область – 0,5–1,5 мл на сторону,
 - околоушно-жевательная, скуловая, щечная области – 3 мл на сторону,
 - угол нижней челюсти и овал лица – 0,5–1,5 мл на сторону,
 - носогубная борозда, область подбородка – 0,5–1 мл на сторону.

У пациентов мелкоморщинистого типа объем препарата может быть увеличен до 2 флаконов на один сеанс.

Мелкоморщинистый тип старения

Пациентка 53 года



Курс процедур № 2 –
4 процедуры в год
с интервалом
1–3 месяца



До



Через 3 месяца